

Quickguide Vrendle GO





Virtually making your life a better reality



Inhoudsopgave

Inleiding	4
Belangrijke gegevens	
Vrendle GO hardware pakket	6
De inhoud van het pakket	
Hardware inschakelen	8
Accounts aanmelden	
Installatie door de ICT afdeling	10
De bril klaarmaken voor gebruik	
De Vrendle GO app openen	12
Starten met de Vrendle GO app	
In de Vrendle GO app	14
Overzicht van de app	
Navigeren in de Vrendle GO app	16
Besturing van de app	
Meekijken op een tablet of telefoon	18
Inschakelen vanuit de tablet	
Meekijken op een tablet of telefoon	20
Inschakelen vanuit de Oculus GO	
Probleemoplosser/troubleshooter	22
Vaker voorkomende problemen	
Contact	24
Zijn er nog vragen?	



Inleiding



Inleiding

Belangrijke gegevens:

Gebruikersnaam waar de VR bril op geregistreerd is: _____

Wachtwoord op te vragen bij: _____

E-mailadres: _____



Vrendle GO hardwarepakket

Hardwarepakket



1x Pointer



1x Oculus Go



1x (Optionele)* tablet

Knoppen

Pointer


Met de knop aan de achterkant kunnen menu's en video's geselecteerd worden. Met de grote ronde knop aan de bovenkant kan een video gepauzeerd worden tijdens het afspelen.

De pointer werkt op één AA batterij.



Oculus Go

De middelste knop is de aan/uit schakelaar. Houd deze één seconde ingedrukt om de bril aan of uit te schakelen. Met de knoppen linksvoor kan het volume aangepast worden.

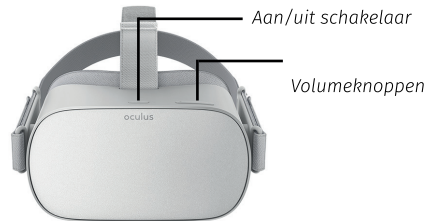

*Vrendle zal op aanvraag een tablet meeleveren



Hardware inschakelen

Hardware inschakelen

Stap 1

Schakel de bril in met de knop aan de bovenzijde, het opstarten kan even duren.

De pointer hoeft niet ingeschakeld te worden.

Stap 2

Om de voorkant van de bril te bepalen vraagt hij af en toe om te kalibreren. Je hoeft dan alleen recht vooruit te kijken en het kleine ronde Oculus knopje onder op de pointer ingedrukt te houden.

Stap 3


Schakel de tablet in als je wil meekijken met de cliënt.

Ga naar pagina 19 voor meer informatie.

Account aanmelden op de tablets

Voor het gebruik van Vrendle GO is een tablet of smartphone niet noodzakelijk. Een tablet of smartphone wordt alleen gebruikt voor het meekijken met de cliënt. In principe is elk Android of Apple tablet of smartphone geschikt.

BELANGRIJK! Je kunt alleen meekijken als je op het mobiele apparaat ingelogd bent op hetzelfde Oculus account als de bril! Het account hiervan kun je opvragen bij de contactpersoon op pagina 5 van de Quickguide.

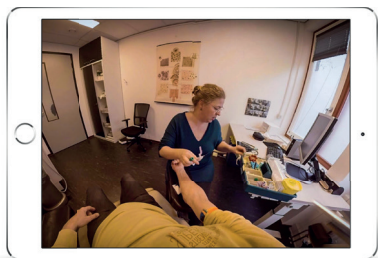



Installatie door de ICT afdeling

Brillen toevoegen op hetzelfde WiFi netwerk

De brillen moeten met hetzelfde WiFi netwerk verbonden zijn als het apparaat waarop meegekeken wordt. Hierbij is belangrijk dat de brillen elkaar mogen/kunnen zien. Gastnetwerken zullen daardoor niet voldoen aan de eisen.

Om de bril met hetzelfde netwerk te verbinden als het gekozen apparaat, ga je naar het menu onderin. Rechts in dit menu staat de knop instellingen. Klik hierop om bij een submenu te komen waarbij de WiFi knop in het midden staat. Je kunt in het WiFi menu de bril verbinden met hetzelfde WiFi netwerk als het gekozen apparaat.


De apparaten maken automatisch verbinding met het laatst gebruikte netwerk. Dit betekent dat als de behandeling altijd op dezelfde plek wordt gedaan, de verbinding maken met het juiste WiFi netwerk een éénmalige handeling is.

Stap 1:

Klik rechtsonder op het knopje instellingen om de WiFi functie tevoorschijn te halen.

Stap 2:

Klik onderin op het knopje WiFi om met het juiste netwerk verbinding te maken.

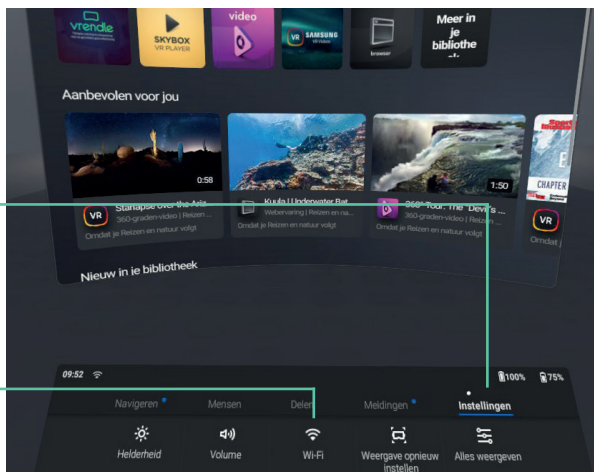

Tip: Wanneer je er niet uit komt kan de lokale ICT jullie hierbij ondersteunen.




De Vrendle GO app openen

De Vrendle GO app openen

De Vrendle GO app openen

Vrendle GO is als app op de bril geïnstalleerd.

Selecteer Bibliotheek en klik op Vrendle GO.

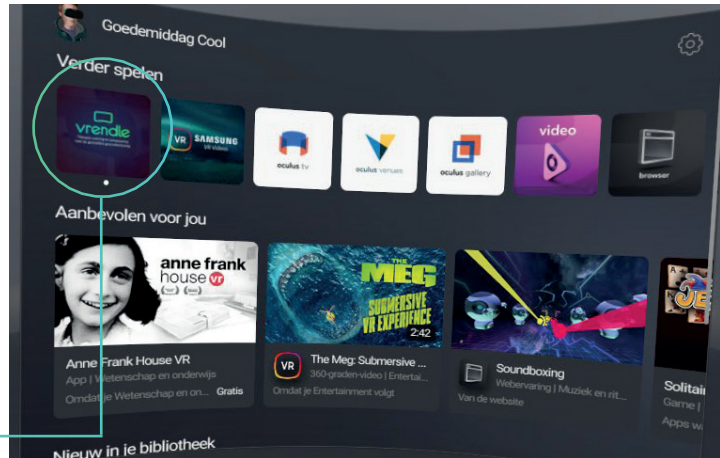

Pointer

Om de Vrendle GO app te openen gebruik je de pointer om te richten op het Vrendle GO app icoontje. Vervolgens druk je op de knop aan de achterkant van de pointer om de app te starten.

Knop om de Vrendle GO app te openen





In de Vrendle GO app

In de Vrendle GO app

Welkom

Wanneer je de Vrendle GO app hebt geopend kom je in een virtuele behandelkamer terecht. Als je rond kijkt zie je het menu waarin links de onderwerpen worden weergegeven, in het midden staan de video's en rechts de modules.



Onderwerpen

Hier staan de verschillende onderwerpen die geselecteerd kunnen worden.

Video's

Hier zie je de video's die worden aangeboden bij het gekozen onderwerp.

Modules

Hier vind je de verschillende modules die geselecteerd kunnen worden in de app.



Navigeren in de Vrendle GO app



In de Vrendle app

Navigeren in de Vrendle GO app

Selecteren

Wanneer je de juiste video hebt gevonden kun je met de knop aan de achterkant van de pointer de video selecteren.

Knop achter op de pointer om video's te selecteren



Knop achter op de pointer om te scrollen

Scrollen

Scrollen in de app wordt gedaan door de knop aan de achterkant van de pointer ingedrukt te houden. Beweeg vervolgens de pointer naar boven of naar beneden om te beginnen met scrollen.

Pauze/hervatten

Wanneer je de video tussentijds wil pauzeren kun je gebruik maken van de grote ronde knop op de bovenkant van de pointer. Je krijgt vervolgens de keuze om terug te gaan naar het menu of om de video te hervatten.

Grote ronde knop om te pauzeren/hervatten





Meekijken op een tablet of telefoon



Meekijken op een tablet of telefoon

Meekijken op een tablet of telefoon

Meekijken (casten) inschakelen vanuit het mobiele apparaat

Meekijken wordt ook wel 'casten' genoemd. Om te casten moet de Oculus app op het mobiele apparaat geïnstalleerd zijn, deze is te vinden in de app store op het apparaat. Open de app en log in met hetzelfde account als de bril anders werkt het casten niet!


Stap 1:

Klik op het casting icoontje rechtsbovenin op je mobiele apparaat.



Stap 2:

Kies de bril waar je vanaf wil casten. Er is waarschijnlijk één Oculus Go bril 'in de buurt'.

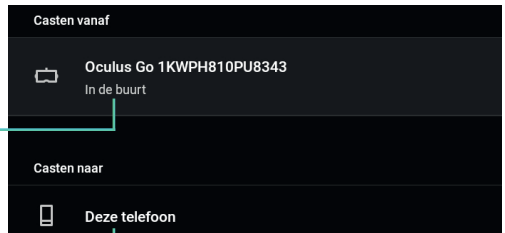


Stap 3:

Klik onder het kopje 'casten naar' op deze telefoon. Onderaan de pagina komt nu een blauwe balk tevoorschijn.

Stap 4:

Klik op de blauwe balk onderaan het mobiele apparaat om te beginnen met casten.

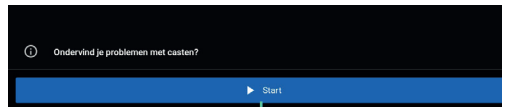



Meekijken op een tablet of telefoon

 Meekijken op een tablet of telefoon


Meekijken op een tablet of telefoon

Meekijken (casten) inschakelen vanuit de Oculus GO

Ook kun je het casten vanuit de bril inschakelen. Hiervoor selecteer je in het menu op de bril de knop 'delen'. Vervolgens verschijnt er een knop 'casten'. Hiermee cast je het beeld naar het gekoppelde mobiele apparaat. Accepteer op het mobiele apparaat het verzoek om te casten.

Stap 1:

Klik onderin het menu op de knop 'delen'. Hierdoor zal de knop 'casten' tevoorschijn komen.

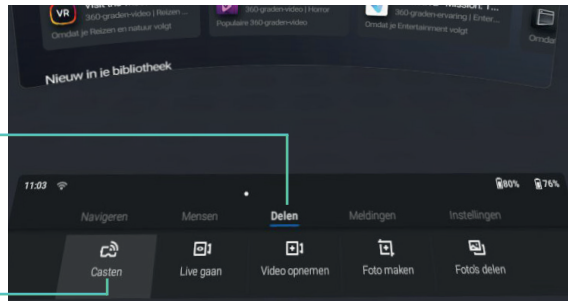


Stap 2:

Klik op de knop 'casten' om het casting menu erbij te halen.

Stap 3:

Klik op de blauwe start knop om te beginnen met casten naar het mobiele apparaat.

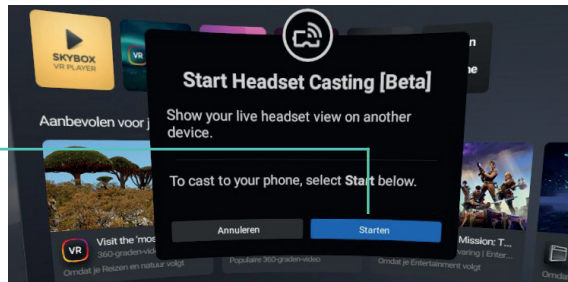

Stap 4:

Accepteer op het mobiele apparaat het castverzoek om te beginnen met casten.



Tips & Tricks



Probleemoplosser/troubleshooter

Ondervind je problemen?

- Controleer of de bril en het mobiele apparaat op hetzelfde WiFi netwerk aangesloten zijn.
- Controleer of het Oculus account op de bril hetzelfde is als op het mobiele apparaat.
- Controleer of de WiFi verbinding goed is bij de ICT afdeling.

Algemene tips

- De bril heeft 2,5 uur nodig om volledig op te laden, vervolgens is hij 3 uren te gebruiken.
- De binnenkant van de bril kan schoongemaakt worden met het bijgeleverde Vrendle brillendoekje.
- Leg de bril na gebruik weer aan de lader zodat de bril nooit zonder stroom komt te zitten.
- Plak de sensor af met een stickertje zodat de bril niet in 'sleep' mode gaat.



Vragen over Vrendle GO?

Wij staan voor je klaar voor alle technische- en/of behandelvragen!



058 23 47 579

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00



support@vrendle.nl

Binnen één werkdag een reactie

vrendle.nl
Tesselschadestraat 6
8913 HB Leeuwarden